



Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Service de pharmacie / Groupe de prévention et traitement des plaies

Rue du Bugnon 46 CH-1011 LAUSANNE Tél dir. (021) 314 49 96
Fax (021) 314 42 99 E-mail Assistance.Pha@chuv.ch



Compresses/ Assortiment CHUV 2009

Composition, propriétés, indications et contre-indications des différents types de pansements

Alginates de calcium

Pansements composés de polymères d'algues marines (acide mannuronique, acide guluronique) associés parfois à de la carboxyméthylcellulose sodique piégeant les débris et les bactéries de la plaie et possédant des capacités hémostatiques grâce au calcium.

Très absorbants.

Ne se délitent au contact de la plaie, absorbent les exsudats de façon verticale et forment progressivement un gel cohésif grâce à l'échange ionique calcium / sodium créant ainsi un milieu humide favorable à la cicatrisation.

Indications :

- Plaies moyennement à fortement exsudatives en phases de détersion et de bourgeonnement,
- Plaies hémorragiques,
- Plaies inflammatoires,
- Plaies infectées.

Appliquer sans dépasser de la plaie puis recouvrir par un pansement secondaire.

Sur les plaies peu exsudatives, appliquer l'alginate humidifié avec du NaCl 0.9%.

La fréquence du changement de pansement dépend de la quantité des exsudats.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
SEASORB Soft (L) <i>Remplace KALTOSTAT</i>	10 x 10 cm - 10 compresses 2.5 x 44 cm - 5 mèches	2'474'104 2'618'572	Pansement non adhésif à base d'alginate et de carboxyméthylcellulose sodique. Découpable.

(L) Produit Liste

Ion Argent

Pansements bactéricides et anti-inflammatoires non adhésifs pouvant être coupé ou plié pour un ajustement aux dimensions de la plaie.
Recouvrir la plaie et fixer par un pansement secondaire non occlusif de type hydrocellulaire.
La fréquence de changement du pansement dépend de la quantité d'exsudats.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
SILVERCEL (L)	5 x 5 cm - 10 compresses 11 x 11 cm - 10 compresses 10 x 20 cm - 5 compresses 2.5 x 30.5 cm - 5 mèches	2'956'300 2'956'323 2'956'352 2'956'369	Pansement alginaté à l'argent pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives infectées ou à risque d'infection; des plaies chroniques (escarres, ulcères veineux, ulcères de pieds diabétiques). Découpable.
AQUACEL Argent (Stocké)	5 x 5 cm – 10 compresses 20 x 30 cm - 5 compresses	2'602'602 2'602'631	Pansement non adhésif pour le traitement des plaies chroniques très exsudatives, des plaies infectées. Découpable.
ACTICOAT (MR)	10 x 10 cm – 5 compresses	2'766'344	Pansement à l'argent formant une barrière antimicrobienne à large spectre, efficace pendant 3 jours pour le traitement des plaies infectées ou à risque d'infection. Découpable.
ACTICOAT Absorbent (MR)	10 x 12.5 cm - 5 compresses	2'876'989	Pansement alginaté à l'argent combinant les propriétés antimicrobiennes de Acticoat avec le pouvoir absorbant d'un alginaté pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives infectées ou à risque d'infection. Découpable.
ACTICOAT 7 (MR)	10 x 12.5 cm - 5 compresses	2'588'919	Pansement à l'argent formant une barrière antimicrobienne à large spectre. Efficace pendant 7 jours. Découpable.

Charbon Actif - Argent

Système multicouche qui absorbe les débris de la plaie, réduit la prolifération des bactéries et exerce un effet désodorisant.

Indications :

- Plaies exsudatives infectées,
- Plaies malodorantes.

Appliquer sans couper, sec. Humidifier si peu d'exsudat puis recouvrir d'un pansement secondaire type hydrocellulaires.

La fréquence de changement du pansement dépend de nature de la plaie.

Contre-indications : Plaies non exsudatives

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
ACTISORB Silver (L)	9.5 x 6.5 cm - 10 compresses 10.5 x 10.5 cm -10 compresses 19 x 10.5 cm - 10 compresses	2'235'380 2'235'368 2'235'345	Pansement non adhésif, bactéricide pour le traitement des plaies exsudatives infectées, des plaies malodorantes. Non découpable. Peut-être méché et utilisé des 2 côtés.

(L) Produit Liste, (MR) Médicaments Réservés

Hydrocellulaires

Pansements en mousse imperméables aux liquides et aux bactéries permettant les échanges gazeux et le maintien de l'humidité de la plaie favorisant ainsi la cicatrisation.

Très absorbants, ne se délitent pas au contact de la plaie.

Indications :

- Plaies chroniques de la phase de détersion à la phase d'épidermisation.

Appliquer la plaque sans l'humidifier de telle sorte qu'elle dépasse le pourtour de la plaie de 2 cm au minimum.

Pour les formes non adhésives, fixer avec un pansement secondaire type film de polyuréthane, bandes adhésives...

Laisser en place au maximum 7 jours ou changer le pansement à saturation.

Toute association avec un autre pansement est possible.

Contre-indications :

- Antiseptiques oxydants (Dakin, eau oxygénée...).

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
MEPILEX Safetac (L)	10 x 12 cm - 5 compresses	3'466'041	Pansement siliconé micro-adhérent, dermoprotecteur permettant une absorption verticale de l'exsudat (protection contre la macération) pour le traitement des plaies chroniques exsudatives. Découpable, doit être fixé. Utilisable sous compression.
MEPILEX Lite (L)	10 x 10 cm - 5 compresses 20 x 50 cm - 2 compresses	2'754'720 2'754'743	Pansement siliconé micro-adhérent, dermoprotecteur, mince et extra-conformable pour le traitement des plaies peu exsudatives, des plaies en phase d'épidermisation (ulcères de jambes et de pieds, escarres, lésions cutanées après radiothérapie ou Epidermolyse bulleuse). Peut également être utilisé comme protection pour peau fragile. Découpable ; doit être fixé.
MEPILEX Border (L)	7.5 x 7.5 cm – 5 compresses	2'341'484	Pansement siliconé micro-adhérent et adhésif en périphérie pour le traitement des plaies chroniques modérément à fortement exsudatives. Non coupable.
TIELLE Plus (Stocké)	11 x 11 cm - 10 compresses 15 x 15 cm - 10 compresses	2'263'867 2'263'873	Pansement adhésif en périphérie pour le traitement des plaies chroniques modérément à fortement exsudatives. Non coupable.
TIELLE Max (L) <i>Remplace Tielle Borderless</i>	15 x 20 cm - 5 compresses	3'323'212	Pansement non adhésif pour le traitement des plaies chroniques faiblement à fortement exsudatives. Découpable, utilisable sous compression.
TIELLE Packing (L)	9.5 x 9.5 cm - 10 compresses	2'053'816	Mousse pour combler les plaies profondes fortement exsudative.

(L) Produit Liste (L)

Hydrocolloïdes

Pansements occlusifs ou semi-occlusifs composés de carboxyméthylcellulose se délitant au contact des exsudats pour former un « gel » brun jaunâtre permettant le maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation. Risque de macération et d'odeurs associées.

Indications :

- Protection cutanée (peau fraîchement cicatrisée, pourtours de VAC, dermo-abrasion)

Appliquer la plaque de telle sorte qu'elle dépasse le pourtour de la plaie de 2 cm au minimum. La changer à saturation.

Laisser en place au maximum 7 jours.

Contre-indications :

- Plaies infectées, eczéma.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
VARIHESIVE Extra-Mince (L)	10 x 10 cm - 5 compresses	1'407'152	Plaque transparente adhésive pour la protection cutanée. Découpable.

Hydrofibres

Pansements non tissés composés de fibres de carboxyméthylcellulose absorbant les exsudats de façon verticale et formant un gel au contact de la plaie sans se déliter.

Très absorbants.

Indications :

- Plaies exsudatives en phases de détersion ou de bourgeonnement.

Appliquer en dépassant le pourtour de la plaie de 1 cm au minimum puis recouvrir par un pansement secondaire.

La fréquence du changement de pansement dépend de la quantité des exsudats.

Laisser en place au maximum 7 jours.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
AQUACEL (L)	5 x 5 cm - 10 compresses 10 x 10 cm - 10 compresses	1'725'018 1'725'024	Pansement non adhésif pour le traitement des plaies chroniques très exsudatives, des plaies humides à sèches en combinaison avec un hydrogel. Découpable.

(L) Produit Liste, (MR) Médicaments Réservés

Hydrogel

Gel contenant 70 à 90% d'eau avec la capacité de relarguer celle ci dans la plaie permettant ainsi l'hydratation des plaies sèches, le maintien de l'humidité.

Indications :

- Phase de détersion des plaies nécrotiques sèches, des plaies fibrineuses peu exsudatives,
- Ramollissement des zones de nécroses.

Appliquer sur la plaie puis recouvrir d'un pansement secondaire non absorbant permettant le maintien de l'humidité de la plaie.

Laisser au maximum 3 jours. L'élimination du gel se fait par rinçage au sérum physiologique.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
NU-GEL (L)	10 tubes - 15 g	1'700'691	Gel transparent à utiliser sur des plaies très sèches pour la détersion des nécrose et des couches de fibrine ou sur une plaie peu exsudative afin de maintenir un milieu humide.
	6 tubes - 25 g	1'700'716	

Interface ou Tulle

Tricot synthétique enduit soit de paraffine, de silicone ou de carboxyméthylcellulose qui permet à l'exsudat de migrer vers un pansement absorbant externe en évitant qu'il ne colle à la plaie.

Utilisation :

- Plaies à tous les stades de la cicatrisation

Appliquer sur la plaie puis recouvrir d'un pansement secondaire.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
JELONET (L)	10 x 10 cm - 10 compresses	0'828'325	Tulle imprégné de paraffine ; très gras et peu adhérent pour le traitement des brûlures, des sites donneurs et receveurs de greffe, des ulcères. Changer tous les 2 jours. Découpable.
	7 m x 10 cm - 1 bande	0'054'929	
MEPITEL (MR)	8 x 10 cm - 5 compresses	3'628'275	Interface siliconée non grasse, non adhérente à la plaie pour le traitement des plaies chroniques, des plaies traumatiques et pour la fixation de greffe. Peut rester en place jusqu'à 14 jours. Découpable.
	12 x 15 cm - 5 compresses	3'628'294	
MEPILEX Transfer (Stocké)	15 x 20 cm - 5 compresses	2'619'301	Interface hydrocellulaire drainante siliconée micro-adhésive pour le traitement des plaies chroniques exsudatives difficiles à panser , de l'épidermolyse bulleuse, des brûlures. Protège contre la macération.
	20 x 50 cm - 2 compresses	2'619'324	

(L) Produit Liste, (MR) Médicaments Réservés

Matrice à effet anti-protéase

Matrice avec argent apportant une sécurité contre l'infection, favorisant la granulation en permettant la protection des facteurs de croissance endogènes par liaison et inactivation des protéases, réduction des cytokines et neutralisation des radicaux libres.

Indications :

- Plaies chroniques (ulcères de jambe, ulcères de pieds diabétiques, escarres, plaies atones),

Appliquer sur la plaie puis recouvrir d'un pansement secondaire.

Au contact de l'exsudat, la matrice se gélifie et se résorbe complètement après 3 jours .

Sur les plaies peu exsudatives, humidifier le pansement avec NaCl 0.9%.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
PRISMA (MR) <i>A commander si besoin</i> <u>Attention : coût élevé</u>	28 cm2 - 10 compresses 123 cm2 - 10 compresses	3'0448'31 3'044'908	Changer le pansement tous les 3 jours sans ôter la partie non résorbée. Découpable.

Pansement à base d'acide hyaluronique

Pansement sous forme de crème à fort pouvoir hydrophile favorisant la migration et la prolifération des cellules fibrinolytiques.

Indications :

- Plaies à tous les stades de la cicatrisation.

Appliquer sur la plaie et recouvrir d'un pansement secondaire.

Changer le pansement tous les 1-2 jours.

Nom	Dimensions	Pharmacode	Indications / Remarques
IALUGEN Plus crème (L)	1 tube - 25 g 1 pot - 500 g	1'479'714 1'907'179	Pouvoir antiseptique (sulfadiazine d'argent) Ne pas utiliser sur le visage
IALUGEN Plus compresse (L)	10 x 10 cm - 30 compresses	1'479'743	Compresse de gaze imprégnée de crème à pouvoir hydrophile et antiseptique (sulfadiazine d'argent)

(L) Produit Liste, (MR) Médicaments Réservés

Document réalisé en collaboration avec le Groupe Prévention et Traitement des Plaies du CHUV.

A l'exception des cas particuliers, les compresses commandées en dehors de cet assortiment seront substituées, après information au service, par leur équivalent.

La responsabilité du CHUV n'est pas engagée lors de l'emploi de ce tableau hors de l'institution.